

# バンテリン<sup>クール</sup>アイシングシート

冷却  
専用

12枚入

(1枚14cm×10cm)

## △ 使用上の注意

1. 次の人は使用しないでください。
  - (1) 皮膚の弱い人。
  - (2) 乳幼児。
2. 次の部位には使用しないでください。
  - (1) 顔、粘膜等。
  - (2) 傷口、湿疹、かぶれ。
  - (3) 貼り薬や塗り薬を使用している部位。
3. 使用中又は使用後に、皮膚の異常（発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）があらわれた場合にはすぐに使用を中止し、医師等に相談してください。
4. 小児、お身体の不自由な方や認知症の方等、自分ですぐに使用を中止できない方や誤った使用をする可能性がある方が使用する場合は、必ず保護者や看護者等の監督のもと、注意して使用させてください。

## 【使用方法】


プラスチックフィルムをはがし、冷やしたい部位に貼ってください。

- 汗をかいたり、使用部位がぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。
- 本品は衛生面や品質面から1回使い切りとしてください。
- 人体以外には使用しないでください。

## 上手な貼り方


1

片方のフィルムをはがしてください。

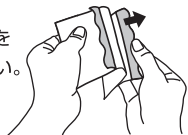

2

粘着面を冷やしたい部位に貼り、残りのフィルムをはがしながら貼ってください。

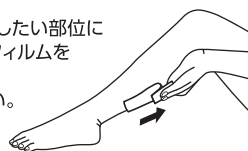

この外箱は、使用の際にはよく読み、大切に保管してください。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光を避け、小児の手の届かない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
  - (2) 他の容器に入れ替えないでください。
  - (3) 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、開口部のチャックをきちんとしめて密封してください。
- 本品は食べられません。

● 本品は医薬品ではありませんので、治療目的で使用しないでください。気になる症状がある場合には、医師等に相談してください。

本製品に関するお問い合わせは

興和株式会社 医薬事業部

お客様相談センターへお願いします。

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

TEL 03-3279-7560 FAX 03-3279-7566

電話受付時間：月～金（祝日を除く）9:00～17:00

販売元 興和株式会社

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

